

Кресло гинекологическое «Armed»



ПАСПОРТ

И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гинекологическое кресло «Armed» способно удовлетворить самые взыскательные требования гинекологов и обеспечить комфортное выполнение гинекологического осмотра, различных диагностических и хирургических манипуляций.

## 1. Основные технические характеристики

Характеристики/ Модели	SZ-I	SZ-II
Ширина кресла, мм	500	550
Длина кресла, мм	1190	1230
Длина подлокотника, мм	400-500	400-550
Диапазон подъема, мм	630-930	630-930
Угол наклона спинной секции	$0 \geq 70^\circ$	$0 \geq 70^\circ$
Угол наклона тазовой секции	$0 \geq 15^\circ$	$0 \geq 15^\circ$
Максимальная грузоподъемность, кг	135	135
Габариты, мм	1190*500	1230*550
Электропитание В / Гц	220 / 50	220 / 50
Масса, кг	45	48

Кресла снабжены современной системой регулировки, работающей как от педалей, так и от пульта дистанционного управления. Регулировка всего кресла по высоте осуществляется электроприводом с ножным управлением, который позволяет также регулировать сиденье, тазовую и спинную секции кресла.

Электропривод работает бесшумно, кресло устойчиво и удобно в работе. Кресло снабжено устройством для разматывания бумаги, предназначенным для профилактики передачи инфекции после каждой манипуляции, и сливной раковиной. Покрытие кресла выполнено из бесшовного полиуретана, оббитого легко моющимся кожзаменителем. Подлокотник удобно устанавливается в нужном положении и откидывается назад.

## 2. Комплект поставки

1. Кресло-коляска \_\_\_\_\_ 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации \_\_\_\_\_ 1 шт.
3. Шестигранный гаечный ключ для регулировки длины подставок для ног и подтягивания крепежных элементов сиденья \_\_\_\_\_ 1 шт.

## 3. Указание мер безопасности

При посадке в кресло и высадке из него, кресло должно находиться в зафиксированном начальном нижнем положении, кресло очень удобно для посадки и не требует ступеньки. Не разрешается вставать на сиденье, облакачиваться на подставки для ног! Категорически запрещается эксплуатация изделия ненадлежащим образом.

#### **4. Обслуживание и уход при эксплуатации:**

При эксплуатации кресло требует определенного технического ухода.

Обивку сиденья и спинки из кожзаменителя необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств. При необходимости дезинфекции допустимо протирание поверхностей 1 % раствором монохлорамина.

Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

#### **Гарантийные обязательства**

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 50444-92 (Р.р. 3,4), ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.0.2.-2005 (МЭК 60601-1-2-2001), ГОСТ Р 51081-97 (ИСО 7176-8-96)

При соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

**Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!**

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Срок гарантии 12 месяцев

Дата продажи \_\_\_\_\_

Сервисное обслуживание приборов производится в \_\_\_\_\_

**Контактный телефон** \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Всего прошнуровано

и пронумеровано

4 ( *Четыре* )

листа (ов)

Генеральный директор

ООО «Медимпорт»

