



ОГРН 1247700176790 | ИНН/КПП 9729369890/77290100

Юр. адрес: 119330, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-т Мичуринский, д. 6 к. 1, помещ. 404

Тел.: +7 (915) 156-11-09 | Банк: ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва | Р/с 40702810238000448651

К/с 30101810400000000225 | БИК 044525225

Памятка по работе с PAL MICROAIRE

Настоящая памятка составлена для хирургов с целью доведения достоверной и обязательной для исполнения информации по эксплуатации, обслуживанию и гарантийному ремонту **автоклавируемой рукояти PAL-650 MICROAIRE LIPOSCULPTOR**.

Для правильной и долговечной работы рукояти PAL-650 обязательно следует соблюдать ряд правил:

- 1) Для работы с аппаратом PAL Microaire следует **допускать** только специалистов, обученных уполномоченными представителями производителя или официального продавца.
- 2) Соблюдать правила мойки и стерилизации рукояти Pal-650 и кабеля Pal-5006.
ВАЖНО! Не допускать высыхания жидкости и органических остатков на инструментах до очистки.
- 3) Манипулятор электрический **PAL-650** рассчитан на непрерывную работу в течение 20 минут при операциях, длящихся свыше 2 часов.
- 4) При **нагреве** рукояти до **42 градусов**, прекратить работу и дать остыть при комнатной температуре.
- 5) **НЕ** перекручивайте кабель и не прилагайте усилия при его подсоединении к компонентам аппарата.
- 6) При работе с манипулятором **нельзя** использовать смазочные материалы и масла.
- 7) Компания MicroAire предусматривает использование многоразовых канюль **не более 20 раз**, ввиду их дальнейшего повреждения и износа манипулятора и травмоопасности.
- 8) Запрещается использовать канюлю, чтобы **ПРИПОДНИМАТЬ ТКАНИ!** Следует избегать излишней нагрузки на кончик канюли и его изгибания. Использование канюль после выработки ресурса ухудшает

их функциональные характеристики и **увеличивает износ манипулятора PAL-650**

- 9) **Не допускать** попадание жидкости внутрь манипулятора
- 10) **Не ронять** манипулятор и кабель.
- 11) **Не разбирайте** и не пытайтесь отремонтировать оборудование самостоятельно.

При ненадлежащем или неправильном использовании изделий или их использовании в иных, не хирургических целях, или в случае демонтажа, переделки или ремонта изделия сторонним лицом, или в случае, если изделие использовалось не по назначению и с нарушением инструкций производителя (а равно и данной сводной инструкции), а также в случае видимых механических повреждений, повлекших выход изделий из строя. действие гарантии на ремонт прекращается.