

Руководство по эксплуатации гинекологического кресла- кровати Модель WelleB06

Редакция от 20 февраля 2012 года

Оглавление

1. Условные обозначения.....	3
2. Назначение и сфера применения.....	4
3. Технические характеристики	4
4. Схематическое изображение	4
5. Меры предосторожности	5
6. Способы управления гинекологическим креслом-кроватью	5
6.1 Фиксация и перемещение стола.....	5
6.2 Регулировка высоты «вверх» и «вниз».....	6
6.3 Регулировка сиденья	7
6.4 Регулировка спинной секции	7
6.5 Регулировка выдвижного столика	8
6.6 Регулировка держателей, подколенных опор, ручной секции	9
7. Техническое обслуживание.....	9
8. Выявление неисправностей и их решение	10
9. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения	10
9.1 Условия для эксплуатации.....	10
9.2 Условия для транспортировки и хранения.....	11
Приложение 1. Принадлежности к гинекологическому креслу-кроватьи модели Welle B06	11
Приложение 2. Гарантийный талон	12

1. Условные обозначения

Данное руководство содержит в себе различные шрифты и символы для объяснения тех или иных характеристик оборудования. Пожалуйста, см. на следующие примеры:

Стандартный шрифт - общая информация

Полужирный шрифт - важное слово или фраза

Внимание - важная информация или указание

Следующие символы означает "предупреждение" ("Warning")



"Предупреждение" означает, что операция может угрожать безопасности пользователя.

"Предупреждение" может означать:

Осторожно: остерегайтесь рычагов

Осторожно: остерегайтесь поражения электрическим током

Инструкции, которым должен следовать пользователь, чтобы избежать повреждения устройства.

WelleB06 – многофункциональное гинекологическое кресло-кровать изготовлено и разработано в соответствии с рыночным спросом. Предназначено для родовспоможения, акушерских процедур и обследований, а также для различного рода гинекологических операций. Перемещение кровати вверх/вниз, изменение наклона, регулировка спинной секции – контролируется приводами.

Гинекологическое кресло-кровать удобно в управлении. Возможна блокировка кровати, оборудование с низким уровнем шума, стабильно работает и имеет высокую приспособляемость к окружающей среде. Наличие выдвижного столика создает удобство медицинскому персоналу, в случае ненадобности, столик можно задвинуть.

Все покрытия, лоток из нержавеющей стали, пластмассовые изделия подлежат очистке.

2. Назначение и сфера применения

Гинекологическое кресло-кровать модели Welle B06 предназначено для женской консультации (осмотра женщин), родовспоможения и различных гинекологических операций.

3. Технические характеристики

Наименование	Характеристики
Габариты	(1810 мм $\pm$ 20мм) X (610мм $\pm$ 15мм)
Высота кровати	Мин.650мм $\pm$ 20мм Макс.900мм $\pm$ 20мм
Угол поворота спинной секции	-10°~70°
Положение Тренделенбурга	$\geq 10^\circ$ и $\geq 20^\circ$
Вращение держателей для рук	$\geq 90^\circ$

4. Схематическое изображение

Гинекологическое кресло-кровать включает: 1.Ручную секцию; 2. Сидение; 3. Поручни для рук; 4. Подколенные опоры; 5.Выдвижной столик; 6. Лоток из нержавеющей стали; 7.Рукоятка; 8. Педаль (см.рис.1)

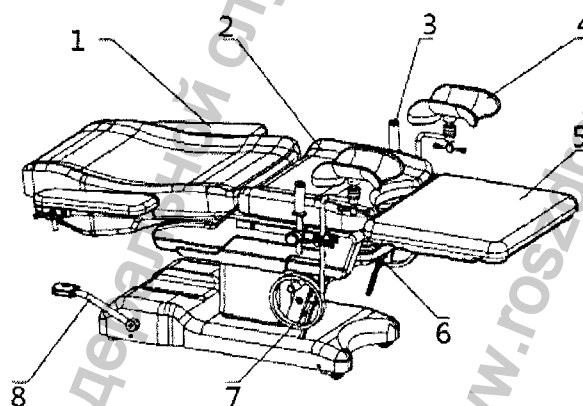


Рис.1

5. Меры предосторожности

Все комплектующие гинекологического кресла-кровати необходимо держать в чистоте (смотреть пункт 9 «Техническое обслуживание и сервис»).

Будьте внимательны, не допускайте попадания конечностей в движущие механизмы, во избежание травмы.

При обнаружении неисправности кресла-кровати, свяжитесь с нашим авторизованным сервисным центром для проведения технического обслуживания.

Не допускайте контакта металлических частей гинекологического кресла-кровати с другим высокочастотным хирургическим оборудованием, во избежание получения ожога.

Матрац не является антистатическим!!!

6. Способы управления гинекологическим креслом-кроватью

6.1 Фиксация и перемещение стола.

На основании кресла-кровати вкручены два винта, с помощью которых Вы можете зафиксировать или разблокировать основание кресло-кровати (см.рис.2).

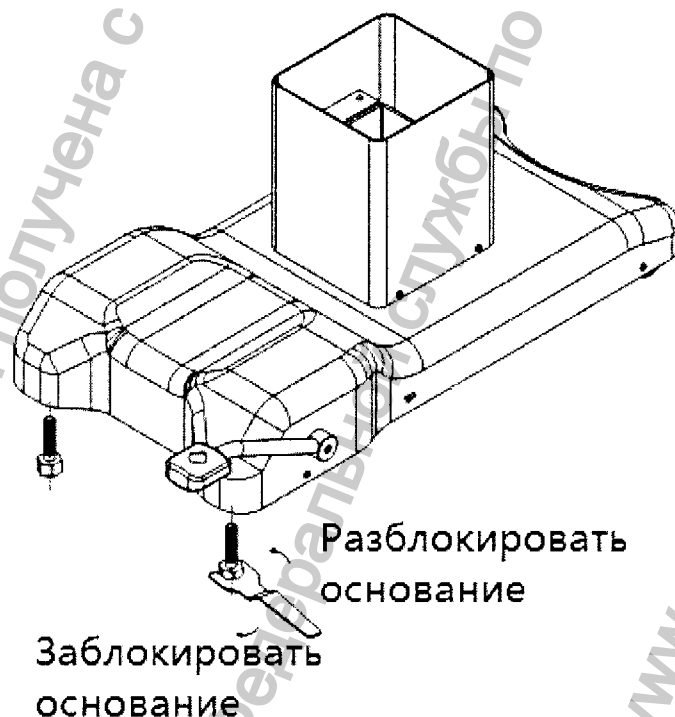


Рис.2

6.2 Регулировка высоты «вверх» и «вниз»

При помощи педали управления возможна регулировка положения кресла вниз и вверх. (Рис.2)

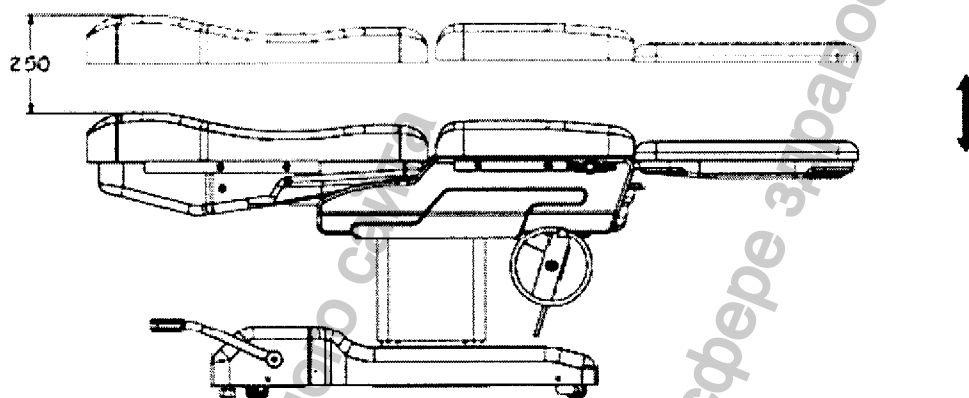


Рис.3

6.3 Регулировка сиденья

Вращая рукоятку, отрегулируйте необходимое положение сиденья.

⚠ Внимание! При регулировке сиденья, появляются зазоры. Пожалуйста, избегайте попадания рук или других предметов в зазоры. Во избежание получения травмы.

⚠ Внимание! Медицинский персонал должны принимать надлежащие меры для предотвращения смещения пациентов при наклоне кровати.

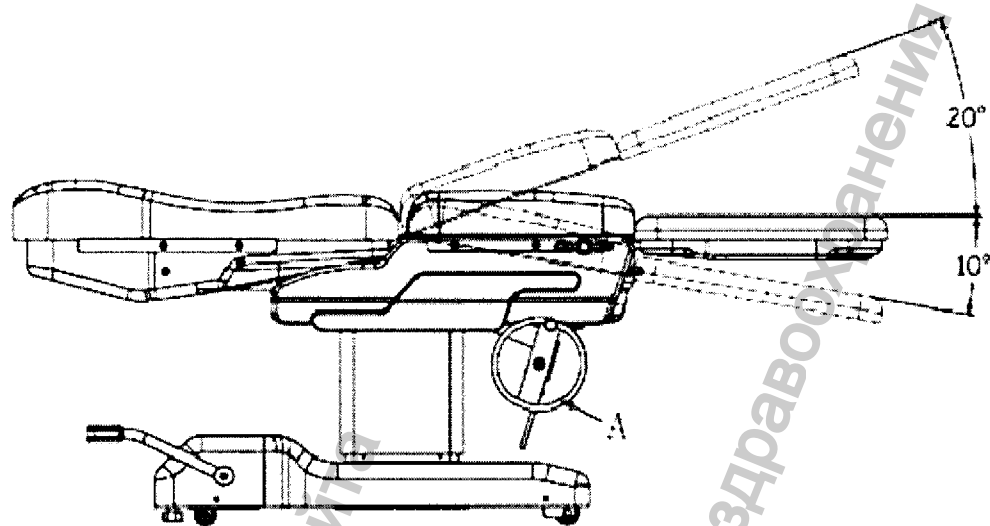


Рис.4

6.4 Регулировка спинной секции

Спинная секция регулируется с помощью регулятора, вручную. Приведя спинку в удобное положение необходимо опустить ручку для фиксации выбранной позиции (см.рис.5)

⚠ Внимание: при данных манипуляциях, избегайте попадания рук в зазор, во избежание получения травмы.

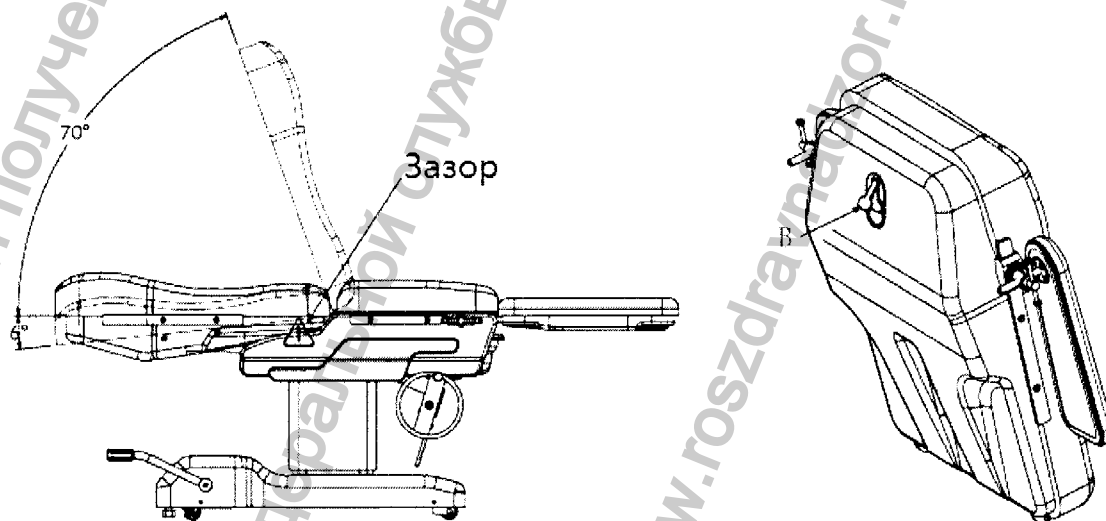


Рис.5

6.5 Регулировка выдвижного столика

Выдвижной столик выдвигается и задвигается вручную. Для полного выдвижения необходимо потянуть стол к себе до конца. Для того чтобы задвинуть стол обратно необходимо провести процедуру противоположную «выдвижению». (см.рис.6)

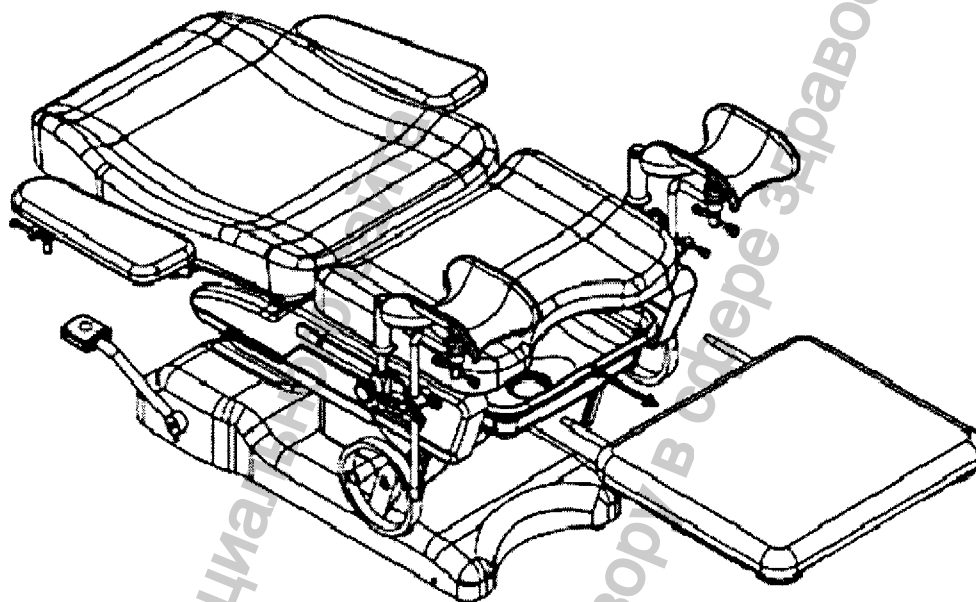


Рис.6

6.6 Регулировка держателей, подколенных опор, ручной секции

Расслабьте регулятор 1 и настройте высоту, угол наклона ручной секции. Расслабьте регулятор 2 и настройте высоту и перемещение вперед – назад. Расслабьте регулятор 3 и настройте угол наклона подколенных опор (см. рис.

7).

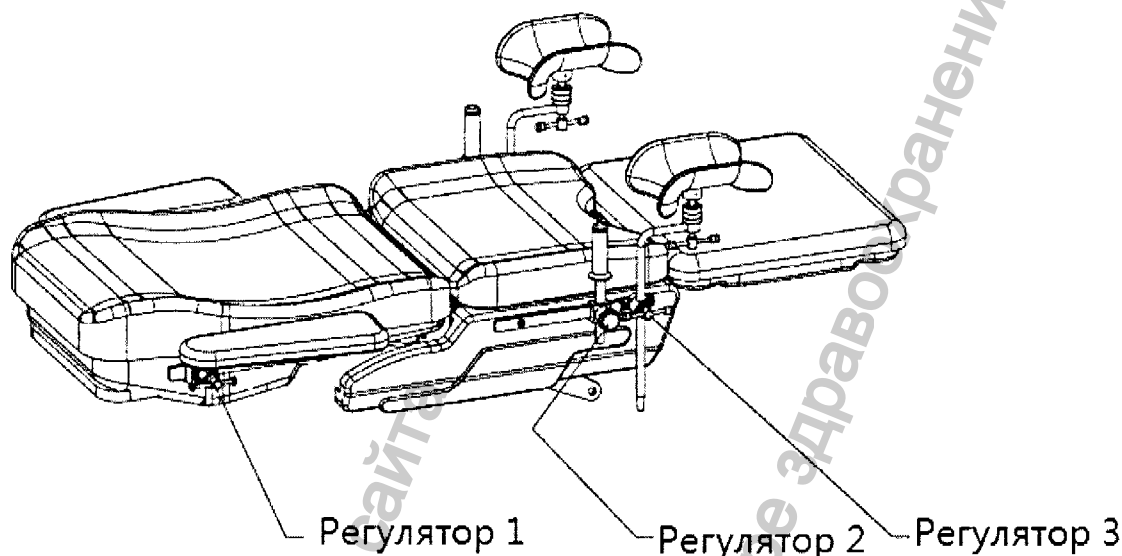


Рис.7

Пояснения к сигналам

Подвижные части гинекологического кресла-кровати Welle B06.



Будьте осторожны при работе с зажимами подвижных частей, дабы избежать травмы конечностей как пациента так и пользователя.



Некоторые части (держатели для рук, опоры для ног, ручная секция, лоток) могут прийти в неисправность в конце срока служба.

7. Техническое обслуживание

7.1 Каждая единица оборудования перед выпуском с завода прошла строгие испытания, пожалуйста не демонтируйте самостоятельно части гинекологического кресла-кровати.

7.2 Кровать не подлежит очистке водой. Вы можете протереть мягкой, чистой тканью, или для лучшего эффекта очистите кресло-кровать 70% спиртом.

7.3 Срок службы аксессуаров (например регулировочный винт) и подвижных частей (например электродвигатель) составляет шесть лет. Своевременно проверяйте уровень износа.

7.4 При повреждении подушки и поверхности выдвижного столика их можно заменить.

7.5 Кресло-кровать должно находиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от агрессивных газов. Не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

8. Выявление неисправностей и их решение

Неисправность	Причина	Способы устранения
Не работает регулировочная рукоятка	Возможно она заблокирована	Свяжитесь с поставщиком
Кресло не управляется от электрической педали	Проблема с электрической проводкой	Свяжитесь с поставщиком
Шум при перемещении кресла-кровати	Закончилось масло	Добавьте масло в движущие части

9. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

9.1 Условия для эксплуатации

1. Температура окружающей среды: 5°C~40°C
2. Относительная влажность: не более 80%
3. Атмосферное давление: 70kPa-106kPa

9.2 Условия для транспортировки и хранения

1. Температура окружающей среды: -40°C~55°C
2. Относительная влажность: не более 95%
3. Атмосферное давление: 50kPa-106kPa

10. Быстро изнашиваемые детали

1. Регулятор
2. Фиксирующие винты
3. Подколенные опоры

11. Послепродажное обслуживание

11.1 Если в течение года, с даты приобретения товара, произошел сбой в работе гинекологического кресла-кровати, Вы можете обратиться в сервисный центр поставщика, который предоставит запасные части и схемы.

11.2 Наша компания обеспечивает техническую поддержку в течение всего срока службы устройства.

Приложение 1.

Принадлежности к гинекологическому креслу-кровати Welle B06.

1. Тазовая секция.
2. Вспомогательная ножная секция.
3. Спинка кровати головной секции.
4. Спинка кровати ножной секции.
5. Подушка для новорожденного.
6. Подушка головной секции – не более 8 шт.
7. Подушка спинной секции – не более 8 шт.
8. Подушка для сидения – не более 8 шт.
9. Подушка вспомогательной секции – не более 8 шт.
10. Чехлы – не более 6 шт.
11. Держатели для ног по Геппелю – не более 2 шт.
12. Опоры для ступеней – не более 2 шт.
13. Рукоятка тазовой секции – не более 2 шт.
14. Ограничители боковые – не более 4 шт.
15. Зажимы винтовые – не более 6 шт.
16. Лоток.
17. Стойка инфузионная.
18. Стол-подставка.

19. Опора лотка.
20. Система центрального тормоза.
21. Бамперы – не более 2 шт.
22. Механизм подъема кровати.
23. Кабель питания.
24. Ножной пульт.
25. Пульт ДУ.
26. Электронный блок управления.
27. Привод гидравлический.
28. Привод электрический.
29. Привод механический.
30. Водонепроницаемый матрас.
31. Ключ монтажный.
32. Ширма.
33. Светильник бестеневой операционный.
34. Ремни для фиксации – не более 8 шт.
35. Электронные весы.
36. CD плеер.
37. Стул врача.
38. Инструкция по эксплуатации.