

Руководство по эксплуатации гинекологического кресла- кровати Модель Welle C20

Редакция от 15 марта 2012 года

Оглавление

1. Условные обозначения.....	3
2. Информация об изделии	3
3. Назначение и сфера применения.....	4
4. Технические характеристики	4
5. Схематическое изображение	4
6. Меры предосторожности	5
7. Способы управления гинекологическим креслом-кроватью	5
7.1 Регулировка спинной секции и сиденья.....	5
7.2 Регулировка подколенных опор.....	6
7.3 Регулировка ручной секции.....	7
7.4 Регулировка выдвижного столика	8
7.5 Регулировка лотка	9
7.6 Фиксация и передвижение основания кресла.....	10
8. Техническое обслуживание	11
9. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения	11
9.1 Условия для эксплуатации.....	11
9.2 Условия для транспортировки и хранения.....	11
10. Послепродажное обслуживание.....	12
Приложение 1. Принадлежности к гинекологическому креслу-кроватьи модели Welle C20	12
Приложение 2. Гарантийный талон.....	13

1. Условные обозначения

Данное руководство содержит в себе различные шрифты и символы для объяснения тех или иных характеристик оборудования. Пожалуйста, см. на следующие примеры:

Стандартный шрифт - общая информация

Полужирный шрифт - важное слово или фраза

Внимание - важная информация или указание

Следующие символы означает "предупреждение" ("Warning")



"Предупреждение" означает, что операция может угрожать безопасности пользователя.

"Предупреждение" может означать:

Осторожно: остерегайтесь рычагов

Осторожно: остерегайтесь поражения электрическим током

Инструкции, которым должен следовать пользователь, чтобы избежать повреждения устройства.

2. Информация об изделии

Гинекологическое кресло-кровать модели Welle C20 является разработкой для проведения всякого рода гинекологических обследований, диагностики и хирургических вмешательств.

Данное изделие - трансформер легко изменяет свою конфигурацию, мгновенно превращаясь из комфортной просторной кровати в многофункциональное родовое кресло и наоборот.

Дизайн кресла-кровати эргономичен, устройство удобно в эксплуатации для медицинского персонала.

Спинная секция и сиденье регулируются вручную, движение подъемных механизмов происходит с помощью газовых пружин, не создает шум.

3. Назначение и сфера применения

Гинекологическое кресло – кровать модели Welle C20 предназначено для проведения гинекологических операций.

4. Технические характеристики

Название	Характеристики
Габариты	$1700\text{мм} \pm 10\text{мм} \times 500\text{мм} \pm 5\text{мм}$
Высота кровати	820мм (регулируется)
Скорость регулировки кровати по высоте	Вверх $0.3\text{м/мин} \pm 0.1\text{м/мин}$ Вниз $0.6\text{м/мин} \pm 0.1\text{м/мин}$
Угол поворота спинной секции	$-12 \pm 1^\circ \sim 75 \pm 1^\circ$
Регулировка ручной секции	90°
Регулировка держателей для рук	90°
Регулировка опор для ног	$\geq 30^\circ$

5. Схематическое изображение

Гинекологическое кресло включает спинную секцию, ручную секцию, держатели для рук, подколенные опоры, выдвижной столик, лоток (см. рис.1)

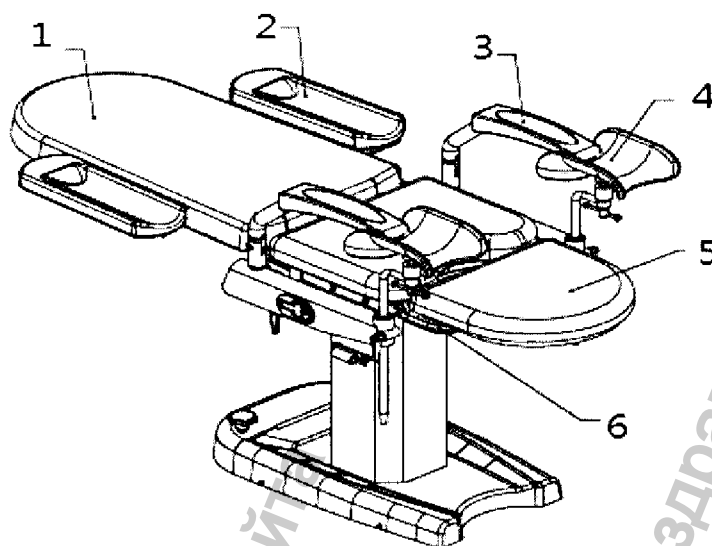


Рис.1

6. Меры предосторожности

6.1 Все комплектующие гинекологического кресла-кровати необходимо держать в чистоте (смотреть пункт 9 «Техническое обслуживание и сервис»).

6.2 Будьте внимательны, не допускайте попадания конечностей в движущие механизмы, во избежание получения травмы.

6.3 При обнаружении неисправности кресла-кровати, свяжитесь с нашим авторизованным сервисным центром для проведения технического обслуживания.

6.4 Не допускайте контакта металлических частей гинекологического кресла-кровати с другим высокочастотным хирургическим оборудованием, во избежание получения ожога.

6.5 Матрац не является антистатическим!!!

7. Способы управления гинекологическим креслом-кроватью

7.1 Регулировка спинной секции и сиденья

Нажмите на верхнюю часть спинной секции, с помощью одной руки, потяните рукоятку 1 – другой рукой, отрегулируйте положение спинной секции, заблокируйте рукоятку. Аналогичным образом, отрегулируйте сиденье, с помощью рукоятки 2 (см.рис.2).

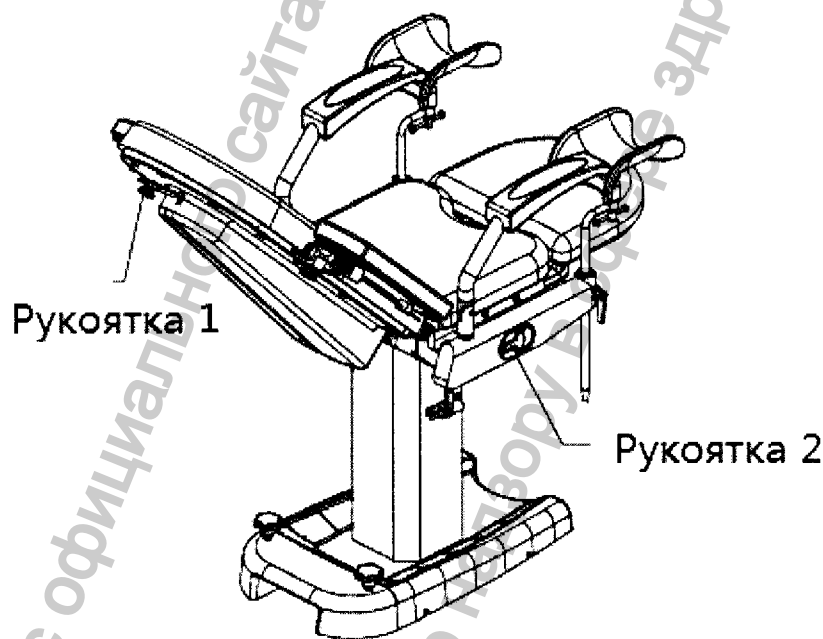


Рис.2

7.2 Регулировка подколенных опор

Поверните зажим 1 против часовой стрелки, отрегулируйте высоту подколенных опор, зафиксируйте зажим. Для регулировки угла наклона подколенных опор, используйте зажим 2 (см. рис.3)



Внимание!

Перед использованием убедитесь в том, что подколенные опоры зафиксированы.

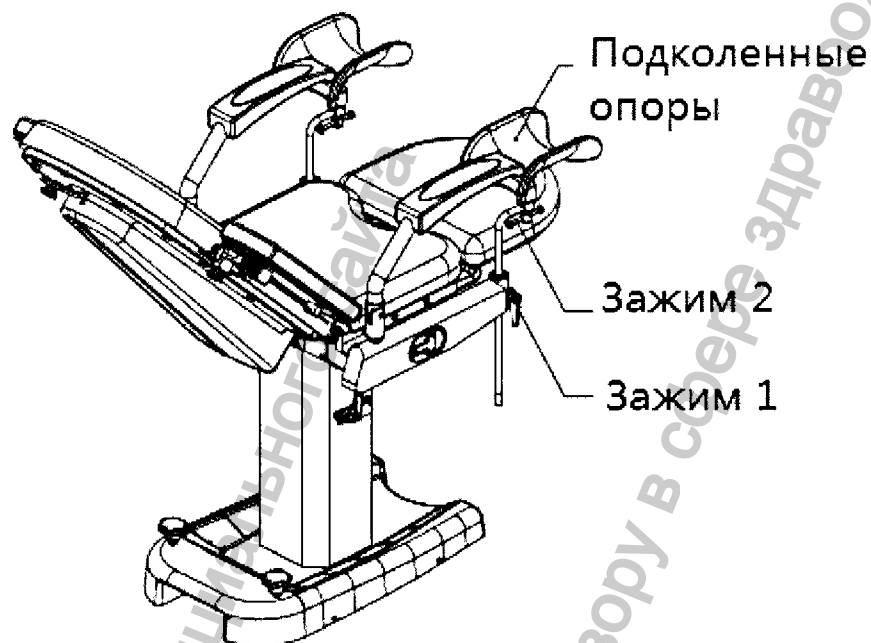


Рис.3

7.3 Регулировка ручной секции

Отрегулируйте ручную секцию вручную, потяните Т-образный рычаг, расположенный под ручной секцией, настройте угол поворота ручной секции, затем зафиксируйте рычаг.

Расслабьте зажим, настройте ручную секцию по направляющей, зафиксируйте зажим (см.рис.4).



Рис.4

7.4 Регулировка выдвижного столика

Под сиденьем есть два зажима, расслабьте, установите столик, зафиксируйте зажимы. Аналогично уберите столик (см. рис.5).

В случае ненадобности столика, закрепите его на основании (см.рис.6).

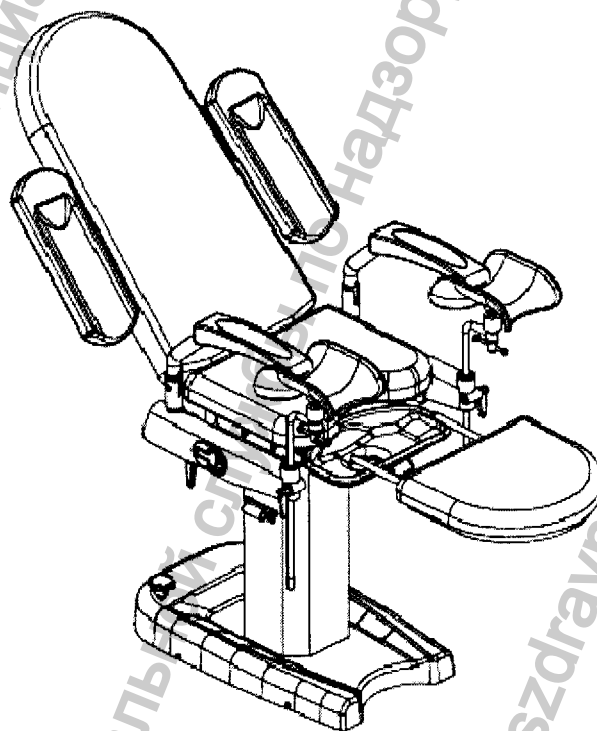


Рис.5

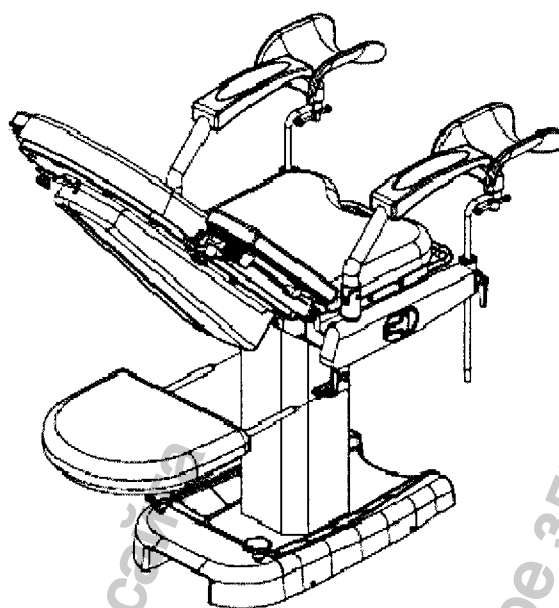


Рис.6

7.5 Регулировка лотка

Для того чтобы выдвинуть лоток достаточно его потянуть за ручку на себя.
Для того чтобы задвинуть его необходимо толкать его от себя (см. рис.7).

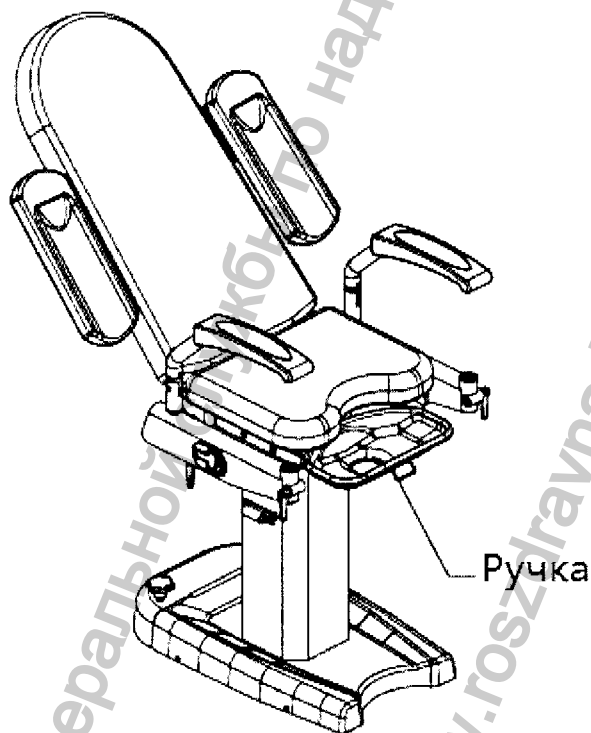


Рис.7

7.6 Фиксация и передвижение основания кресла.

Гинекологическое кресло-кровать имеет колеса, с помощью которых может легко передвигаться. Рядом с колесами имеется два фиксирующих зажима. Поверните зажимы по часовой стрелке, чтобы убрать колеса и зафиксировать положение кресла (см. рис.8).

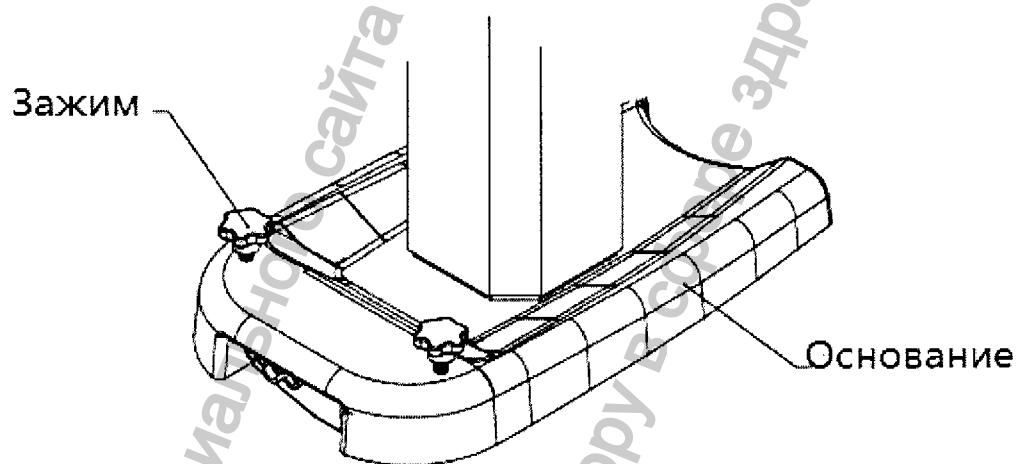


Рис.8

Пояснения к сигналам

Подвижные части гинекологического кресла-кровати Welle C20.



Будьте осторожны при работе с зажимами подвижных частей, дабы избежать травм конечностей как пациента, так и пользователя.



Некоторые части (зажимы, подколennые опоры) могут прийти в неисправность в конце срока службы.

8. Техническое обслуживание

8.1 Каждая единица оборудования перед выпуском с завода прошла строгие испытания, пожалуйста не демонтируйте самостоятельно части гинекологического кресла-кровати.

8.2 Срок службы аксессуаров (например, регулировочный винт) и подвижных частей (например, электродвигатель) составляет шесть лет. Своевременно проверяйте уровень износа.

8.3 При повреждении подушки и поверхности выдвижного столика их можно заменить.

8.4 Кресло-кровать должно находиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от агрессивных газов. Не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Неисправность	Причина	Способы устранения
Кресло не движется	Неисправность внутренней газовой пружины	Свяжитесь с поставщиком
Шум при перемещении кресла-кровати	Закончилось масло	Добавьте масло в движущие части

9. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

9.1 Условия для эксплуатации

1. Температура окружающей среды: 5°C~40°C
2. Относительная влажность: не более 80%
3. Атмосферное давление: 70kPa-106kPa

9.2 Условия для транспортировки и хранения

1. Температура окружающей среды: -40°C~55°C
2. Относительная влажность: не более 95%
3. Атмосферное давление: 50kPa-106kPa

Упакованное кресло-кровать должно храниться в хорошо-проветриваемом помещении, с влажностью не более 80%

10. Послепродажное обслуживание

10.1 Если в течение года, с даты приобретения товара, произошел сбой в работе гинекологического кресла-кровати, Вы можете обратиться в сервисный центр поставщика, который предоставит запасные части и схемы.

10.2 Наша компания обеспечивает техническую поддержку в течение всего срока службы устройства.

Приложение 1.

Принадлежности к гинекологическому креслу-кровати модели Welle C20.

1. Тазовая секция.
2. Вспомогательная ножная секция.
3. Спинка кровати головной секции.
4. Спинка кровати ножной секции.
5. Подушка для новорожденного.
6. Подушка головной секции – не более 8 шт.
7. Подушка спинной секции – не более 8 шт.
8. Подушка для сидения – не более 8 шт.
9. Подушка вспомогательной секции – не более 8 шт.
10. Чехлы – не более 6 шт.
11. Держатели для ног по Геппелю – не более 2 шт.
12. Опоры для ступеней – не более 2 шт.
13. Рукоятка тазовой секции – не более 2 шт.
14. Ограничители боковые – не более 4 шт.
15. Зажимы винтовые – не более 6 шт.

16. Лоток.
17. Стойка инфузионная.
18. Стол-подставка.
19. Опора лотка.
20. Система центрального тормоза.
21. Бамперы – не более 2 шт.
22. Механизм подъема кровати.
23. Кабель питания.
24. Ножной пульт.
25. Пульт ДУ.
26. Электронный блок управления.
27. Привод гидравлический.
28. Привод электрический.
29. Привод механический.
30. Водонепроницаемый матрац.
31. Ключ монтажный.
32. Ширма.
33. Светильник бестеневой операционный.
34. Ремни для фиксации – не более 8 шт.
35. Электронные весы.
36. CD плеер.
37. Стул врача.
38. Инструкция по эксплуатации.

Приложение 2.

Гарантийный талон

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Изделие

Гинекологическое кресло-кровать

Модель

Welle C20

Серийный номер

Дата ввода в
эксплуатацию

« _____ » _____ 20 _____ г.

Гарантийный
период

Представитель:

Подпись: _____

МП

Настоящим подтверждаю приемку установленного оборудования,

пригодного к эксплуатации, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Представитель заказчика: _____

МП

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdramadzor.ru