

Кресло гинекологическое

Welle C30

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данная инструкция по эксплуатации предоставляет информацию о техническом устройстве гинекологического кресла Welle C30 и руководство по проведению монтажа.

Прежде чем приступать к эксплуатации кресла, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию. Обратите особое внимание на примечания. Данная инструкция рекомендована к использованию кресла после проведения монтажа.

Содержание:

Обозначение символов в инструкции по эксплуатации.....	3
Введение.....	3
Область применения.	4
Основные характеристики.....	4
Схематическое изображение.....	5
Меры предосторожности.....	5
Управление.....	6
Фиксация и передвижение основания кресла.....	6
Подъем и опускание гинекологического кресла-кровати.....	7
Регулировка упоров для ног.....	8
Управление спиной секцией.....	8
Вращение упоров для ног.....	9
Установка держателей для рук.....	9
Регулировка лотка.....	9
Регулировка опор по Геппелю.....	10
Принадлежности.....	10
Схема электропитания.....	11
Класс безопасности.....	11
Пояснения к сигналам.....	11
Обслуживание.....	11
Неисправности и их устранение.....	12
Условия для нормальной эксплуатации, хранения и транспортировки...12	
Быстроизнашиваемые детали.....	13
Послепродажное обслуживание.....	13
Приложение 1. Принадлежности к гинекологическому креслу-кровати модели Welle C30	11
Приложение 2. Гарантийный талон.....	12

1. Указатель символов

Для удобства использования и улучшения читабельности в данной инструкции используются различные символы и шрифты.

Обратите внимание на пример, представленный ниже:

- Стандартный шрифт—основная информация
- Жирный шрифт—важное слово или фраза
- Примечание—указание или важная информация
- Данный символ обозначает «Внимание»



Знак «Внимание» указывает на то, что определенная операция или действие может угрожать безопасности пользователя. Обратные действия угрожают причинить ущерб здоровью пользователя.

Знак «предупреждение» включает в себя:

- Осторожно: не прищемите!
- Осторожно: остерегайтесь поражения электрическим током
- Инструкции, которым должен следовать пользователь, чтобы избежать повреждения устройства.

2. Введение.

Гинекологическое кресло-кровать модели Welle C30 является продуктом для клиник и лечебных учреждений, предназначенное для проведения гинекологического осмотра, диагностики и хирургических операций.

Движения кресла вверх и вниз, а также регулировки спинной секции осуществляются при помощи педали управления. Кресло оснащено немецким электроприводом, что делает его работу бесшумной и гарантирует надежную и бесперебойную работу на протяжении продолжительного срока эксплуатации. Все материалы используемые при изготовлении матраца устойчивы к дезинфекции, эстетичны и долговечны. При изготовлении матраца применяется бесшовная технология (на поверхности), которая препятствует попаданию органических веществ и грязи во внутреннюю структуру. Цвет обивки может быть выбран по каталогу.

3. Назначение и сфера применения.

Гинекологическое кресло Welle C30 предназначено для проведения гинекологических осмотров и операций.

4. Основные технические параметры.

Назначение	Технические параметры
Габариты	(1800mm±20mm)x(610mm±15mm)

Высота	510 ±20mm~ 810±20mm
Скорость подъема\опускания(при максимальной нагрузке)	Вверх:0.3m/min±0.1m/minВниз: .0.6m/min±0.1m/min
Регулировка спинной секции	-15°---- 85°

5. Схематическое устройство модели.

Данная модель включает в себя такие основные части как кресло, ножная секция, опоры по Гейпелю, лоток, держатели для рук, упоры для ног, педаль управления.(Рис.1.)

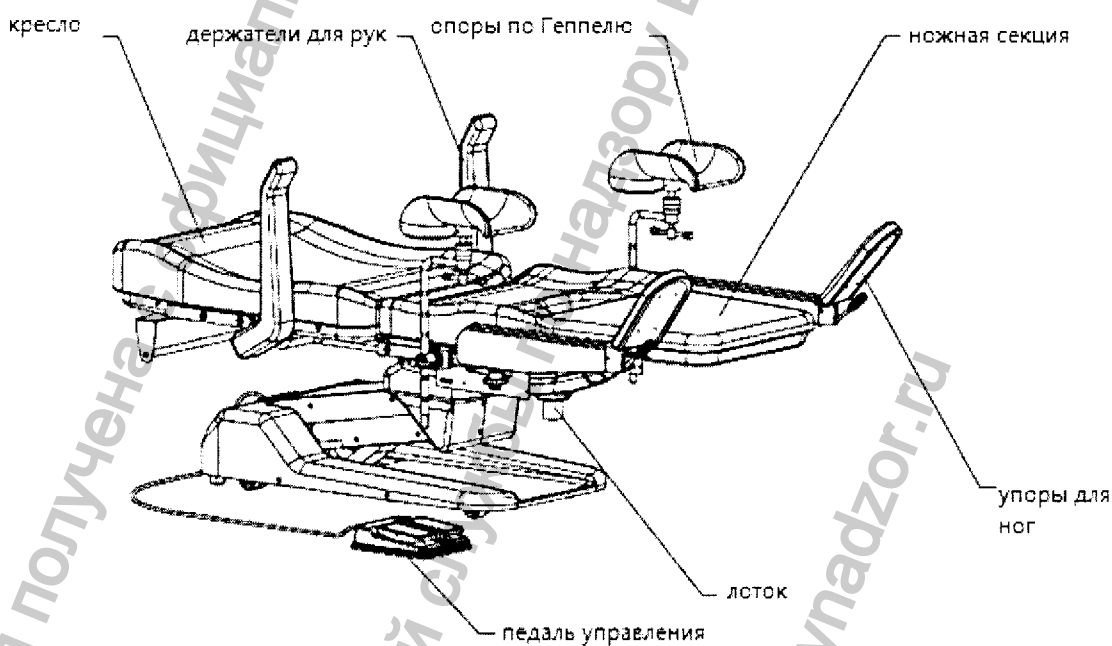


Рис. 1.

6. Меры предосторожности

- 6.1 Каждая деталь гинекологического кресла-кровати должна содержаться в чистоте, способы очистки подробно описаны в параграфе 12 (техническое обслуживание и сервис)
- 6.2 Устройство использует разъем питания с одной фазой и тремя полярностями, перед включением устройства в сеть обратите особое

внимание на розетку, убедитесь, что она надежна заземлена.

Внимание: Не пользуйтесь креслом если заземление отсутствует.

- 6.3 После окончания работы, оборудование должно быть выключено из электрической сети.
- 6.4 Не допускать попадание рук или ног в подъемный механизм.
- 6.5 Работы по устранению неполадок в работе оборудования должны проводиться сервисной службой нашей компании или же официальным дилером. Самостоятельно выполнять ремонтные работы категорически запрещается.
- 6.6 Не допускайте контакта металлических частей гинекологического кресла-кровати с другим высокочастотным хирургическим оборудованием.
- 6.7 Матрац не является антистатическим.

7. Управление

7.1 Пользователь может придать креслу любое желаемое положение с помощью электрической педали. (Рис.2.)

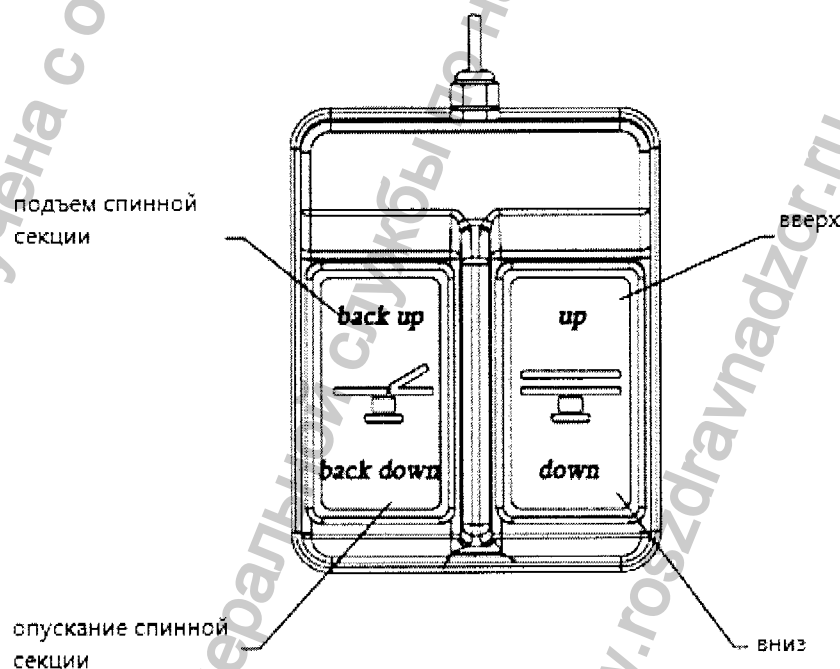


Рис. 2.



Внимание!

Уровень водонепроницаемости педали управления соответствует IPX 8

7.2 Фиксация и передвижение основания кресла. (Рис.3)

При помощи вращения по часовой и против часовой стрелки двух винтов, находящихся под основанием кресла, его можно как зафиксировать, так и привести в мобильное передвижение.

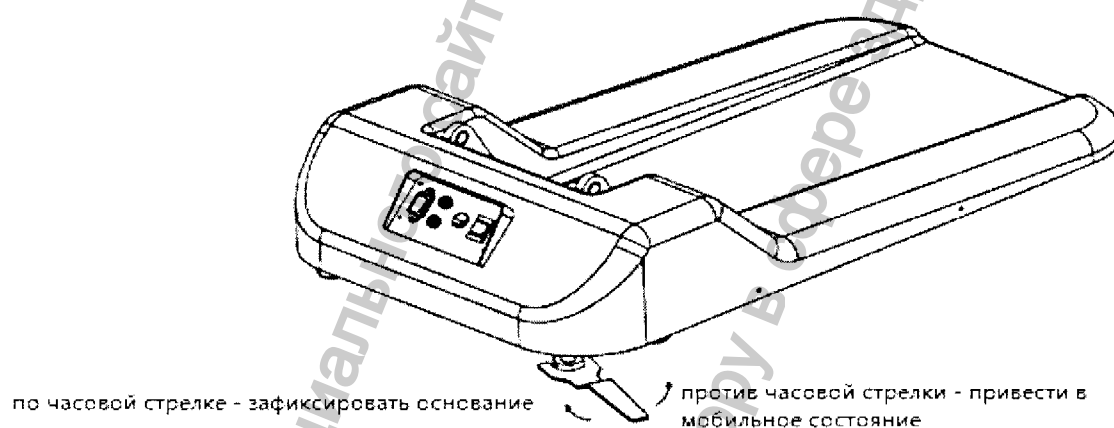


Рис. 3.

7.3 Подъем и опускание гинекологического кресла. (Рис.4.)

При помощи соответствующих клавиш кресло можно как поднять, так и опустить на нужную высоту.

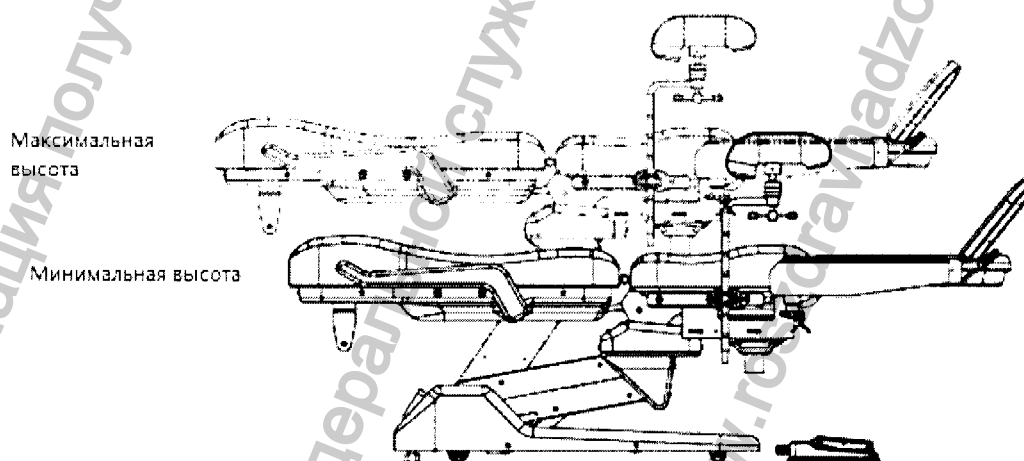


Рис. 4.

7.4 Регулировка упоров для ног. (Рис. 5.)

Ослабьте винт, как показано на рисунке. Приведите упоры в нужное положение и зафиксируйте винт.

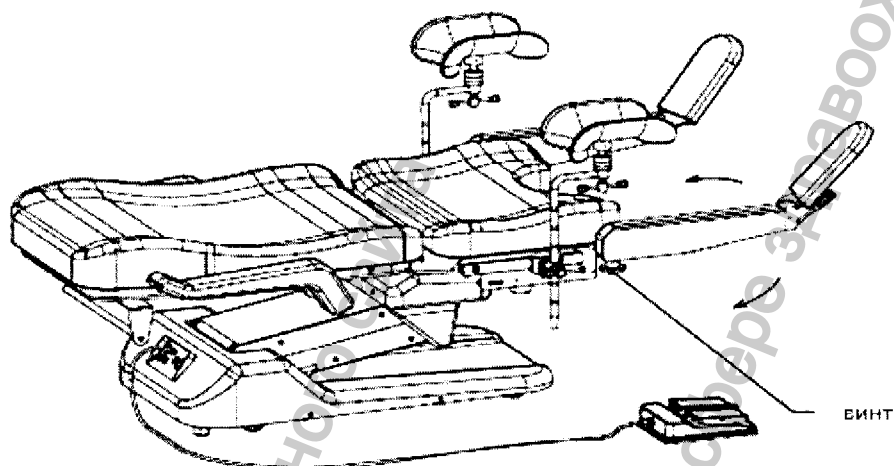


Рис. 5.

7.5 Регулировка спинной секции. (Рис. 6.)

Спинка кресла регулируется при помощи клавиш вверх вниз на педали управления.

Высшее положение

Низкое положение

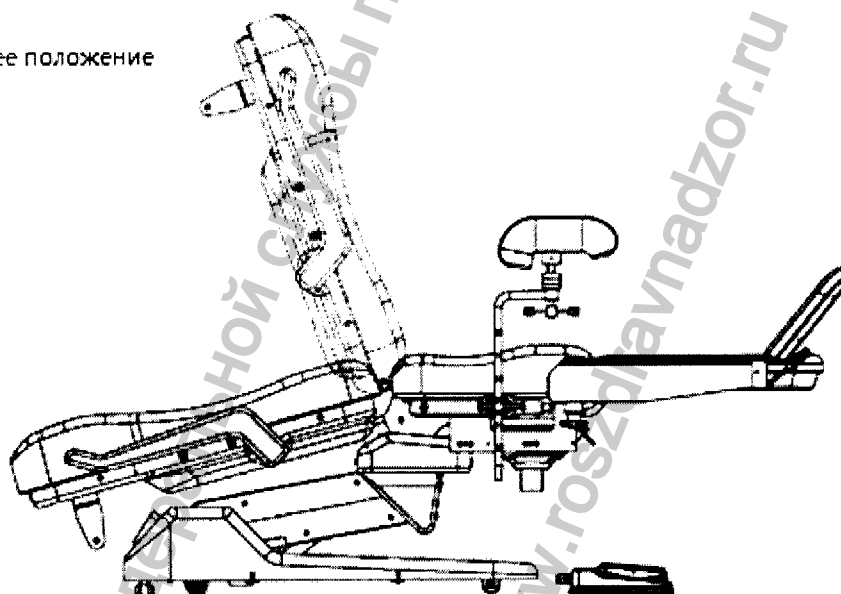


Рис. 6.

7.6 Вращение упоров для ног.

Выберите необходимое положение и при помощи ключа зафиксируйте положение. (Рис.7.)

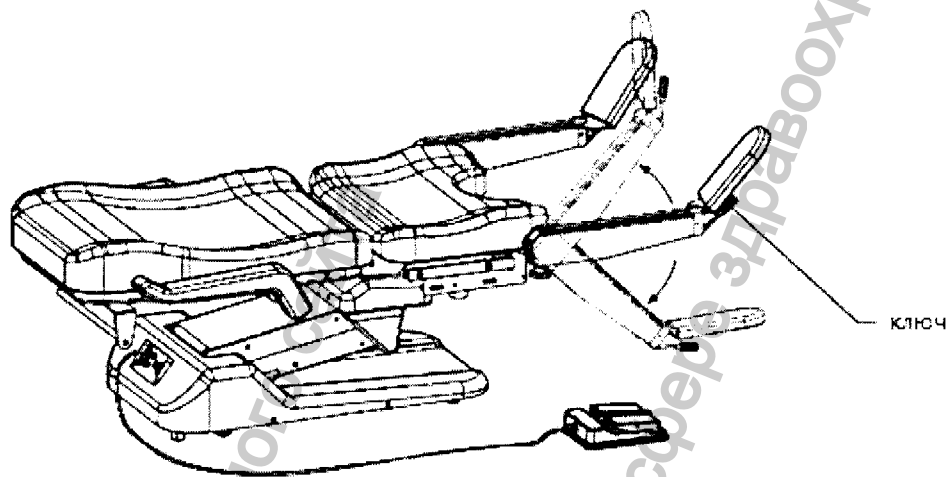


Рис. 7.

7.7 Установка держателей для рук.

Как показано на рисунке 8. одной рукой надавите на держатель, второй рукой поверните его по направлению стрелки.



Рис. 8.

7.8. Регулировка лотка.

Для того, чтобы использовать лоток потяните за ручку, расположенную на лотке, на себя. Для того чтобы вернуть его в исходное положение проделайте все в обратном порядке.

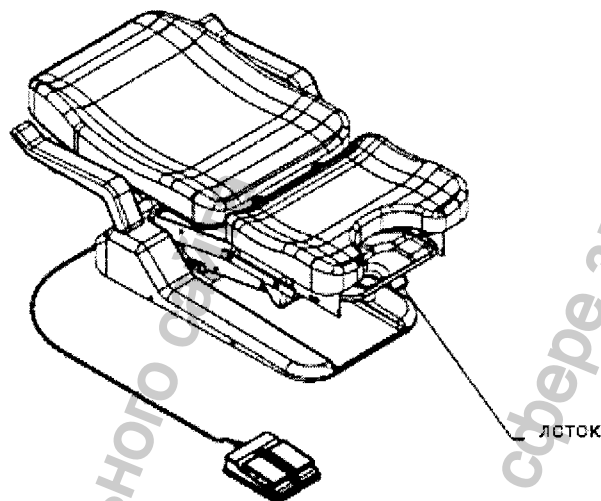


Рис. 9.

(Рис.9)

7.9 Регулировка опор по Геппелю.

Опоры регулируются по высоте, путем ослабления зажимов, после того как положение выбрано следует затянуть зажимы. Также опоры регулируются в их верхней части (непосредственно их пластмассовая часть), также путем ослабления фиксирующих зажимов (Рис. 10).


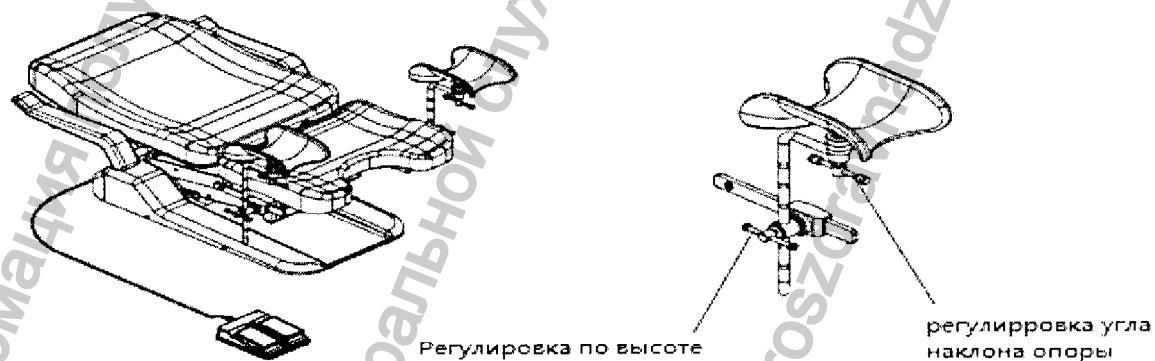


Рис. 10.

8. Принадлежности.

1. Тазовая секция.
2. Вспомогательная ножная секция.
3. Спинка кровати головной секции.
4. Спинка кровати ножной секции.
5. Подушка для новорожденного.
6. Подушка головной секции – не более 8 шт.
7. Подушка спинной секции – не более 8 шт.
8. Подушка для сидения – не более 8 шт.
9. Подушка вспомогательной секции – не более 8 шт.
10. Чехлы – не более 6 шт.
11. Держатели для ног по Геппелю – не более 2 шт.
12. Опоры для ступеней – не более 2 шт.
13. Рукоятка тазовой секции – не более 2 шт.
14. Ограничители боковые – не более 4 шт.
15. Зажимы винтовые – не более 6 шт.
16. Лоток.
17. Стойка инфузионная.
18. Стол-подставка.
19. Опора лотка.
20. Система центрального тормоза.
21. Бамперы – не более 2 шт.
22. Механизм подъема кровати.
23. Кабель питания.
24. Ножной пульт.
25. Пульт ДУ.
26. Электронный блок управления.
27. Привод гидравлический.
28. Привод электрический.
29. Привод механический.
30. Водонепроницаемый матрац.
31. Ключ монтажный.
32. Ширма.
33. Светильник бестеневого операционный.
34. Ремни для фиксации – не более 8 шт.
35. Электронные весы.
36. CD плеер.
37. Стул врача.
38. Инструкция по эксплуатации.

9. Схема электропитания.

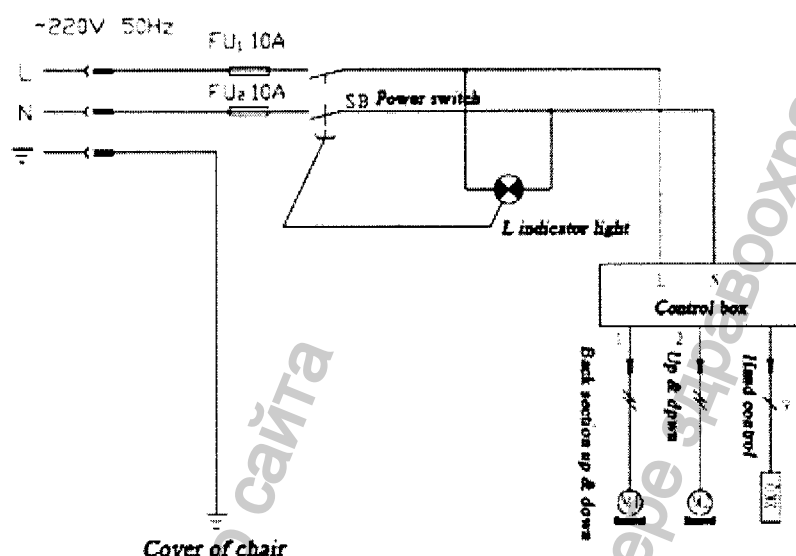

10. Класс безопасности

По степени защиты от электрического тока гинекологическое кресло-кровать относится к классу I, тип В.

11. Пояснение символов

11.1 Движущиеся части гинекологического кресла



Будьте осторожны при работе с зажимами подвижных частей, дабы избежать травм конечностей как пациента так и пользователя.

11.2 Электробезопасность



Не пользоваться устройством без заземления.

Неправильное использование сетевого шнура может привести к поражению током пользователя, пациента и оборудования



Некоторые части изделия (пункт 15, «быстро изнашиваемые детали») могут быть повреждены в процессе эксплуатации, либо срок службы которых подошел к концу. Регулярно проверяйте состояние (пункт 13, устранение неисправностей) или обратитесь к специалистам нашей компании за технической поддержкой.

12. Техническое обслуживание и сервис

12.1. Каждая единица оборудования перед выпуском с завода прошла строгие испытания, пожалуйста, не демонтируйте самостоятельно части гинекологического кресла-кровати.

12.2. Вытаскивая сетевой провод придерживайте вилку. Не прикасайтесь к проводу голыми руками, в случае если он не изолирован.

12.3. Не промывайте кресло водой. Протирайте чистой мягкой тканью, или раствором 70% изопропилового спирта для лучшего эффекта. Для поддержания изделия в чистоте данная процедура рекомендована не чаще одного раза в год.

12.4 Если необходимо заменить предохранитель, используйте предохранитель модели RF1-20-10A (Ф5×20мм) закрепите его винтами.

12.5 Срок службы некоторых деталей (например, фиксирующий винт) и движущихся частей (болт электромотора) составляет шесть лет. Регулярно проверяйте данные детали и не забывайте осуществлять замену до истечения срока службы.

12.7 Кресло должно храниться в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от коррозионно-активных газов и прямых солнечных лучей.

13. Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Способ устранения
Негорит индикатор мощности	Не исправен предохранитель	Замените (RF1-20-10A (φ5×20мм))
Кресло не управляется от электрической педали	Проблемы с электрической проводкой	Обратитесь за помощью к специалисту нашей компании
Шум при эксплуатации устройства	Закончилось масло.	Добавьте масло в движущиеся части устройства.

14. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

14.1 Условия для эксплуатации

1. Температура окружающей среды: 5°C~40°C
2. Относительная влажность: не более 80%
3. Атмосферное давление: 70kPa-106kPa
4. Напряжение: AC 220V±22VA
5. Частота: 50Hz±1HZ
6. Потребляемая мощность: 285 VA

14.2 Условия для транспортировки и хранения

1. Температура окружающей среды: -40°C~55°C

2. Относительная влажность: не более 95%
3. Атмосферное давление: 50kPa-106kPa
4. Упакованное изделие следует хранить в хорошо проветриваемом помещении, где относительная влажность составляет 80%, отсутствуют коррозионно-активные газы.

15. Быстроизнашиваемые детали

1. Фиксирующие винты
2. Опоры для ног

16. Послепродажное обслуживание

16.1 Если в течение года, с даты приобретения товара, произошел сбой в работе гинекологического кресла-кровати, Вы можете обратиться в сервисный центр поставщика, который предоставит запасные части и схемы.

16.2 Наша компания обеспечивает техническую поддержку в течение всего срока службы устройства.

Приложение 1.

Комплектация к гинекологическому креслу-кровати модели Welle C30.

1. Тазовая секция.
2. Вспомогательная ножная секция.
3. Спинка кровати головной секции.
4. Спинка кровати ножной секции.
5. Подушка для новорожденного.
6. Подушка головной секции – не более 8 шт.
7. Подушка спинной секции – не более 8 шт.
8. Подушка для сидения – не более 8 шт.
9. Подушка вспомогательной секции – не более 8 шт.
10. Чехлы – не более 6 шт.
11. Держатели для ног по Геппелю – не более 2 шт.
12. Опоры для ступеней – не более 2 шт.
13. Рукоятка тазовой секции – не более 2 шт.
14. Ограничители боковые – не более 4 шт.
15. Зажимы винтовые – не более 6 шт.
16. Лоток.
17. Стойка инфузионная.
18. Стол-подставка.
19. Опора лотка.
20. Система центрального тормоза.
21. Бамперы – не более 2 шт.

- 22. Механизм подъема кровати.
- 23. Кабель питания.
- 24. Ножной пульт.
- 25. Пульт ДУ.
- 26. Электронный блок управления.
- 27. Привод гидравлический.
- 28. Привод электрический.
- 29. Привод механический.
- 30. Водонепроницаемый матрас.
- 31. Ключ монтажный.
- 32. Ширма.
- 33. Светильник бестеневой операционный.
- 34. Ремни для фиксации – не более 8 шт.
- 35. Электронные весы.
- 36. CD плеер.
- 37. Стул врача.
- 38. Инструкция по эксплуатации.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru