

Руководство по эксплуатации гинекологического кресла-кровати Welle C60

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdraznadzor.ru

Оглавление

1. Информация об изделии	3
2. Назначение и сфера применения	3
3. Технические характеристики	3
4. Схематическое изображение	4
5. Меры предосторожности	5
6. Способы управления гинекологическим креслом-кроватью	5
7. Класс безопасности изделия	11
8. Техническое обслуживание	11
9. Выявление неисправностей и их решение	12
10. Условия эксплуатации, хранения и транспортировки изделия	12
11. Послепродажное обслуживание	13
12. Приложение 1. Схема электропитания	13
13. Принадлежности	13
14. Гарантийный талон	14

1. Информация об изделии

Гинекологическое кресло-кровать Welle C60 является разработкой для проведения всякого рода гинекологических обследований, диагностики и хирургических вмешательств.

При создании данной модели уделялось большое внимание созданию комфорта пациента и пользователя.

2. Назначение и сфера применения

Гинекологическое кресло-кровать серии Welle используется как для гинекологических осмотров, так и для родовспоможения, а также для различного рода хирургических операций.

3. Технические характеристики

Модель	Welle C60 A	Welle C60 B
Габариты	$(1110\text{mm} \pm 20\text{mm}) \times (565\text{mm} \pm 15\text{mm})$	$(1110\text{mm} \pm 20\text{mm}) \times (565\text{mm} \pm 15\text{mm})$
Высота	Низкое положение: $500\text{mm} \pm 20\text{mm}$; высокое положение: $1070\text{mm} \pm 30\text{mm}$	Низкое положение: $420\text{mm} \pm 20\text{mm}$; высокое положение: $1070\text{mm} \pm 30\text{mm}$
Скорость подъемного механизма	Скорость подъема: $40\text{mm/s} \pm 1.7\text{mm/s}$; Скорость опускания: $52\text{mm/s} \pm 1.7\text{mm/s}$	Скорость подъема: $20\text{mm/s} \pm 1.7\text{mm/s}$; Скорость опускания: $28\text{mm/s} \pm 1.7\text{mm/s}$
Угол наклона	-----	вперед $\geq -7^\circ$; назад $\geq 45^\circ$
Ход держателей для ног	$150\text{mm} \pm 20\text{mm}$	$100\text{mm} \pm 20\text{mm}$
Ход лотка	-----	$360\text{mm} \pm 20\text{mm}$

4. Схематическое изображение

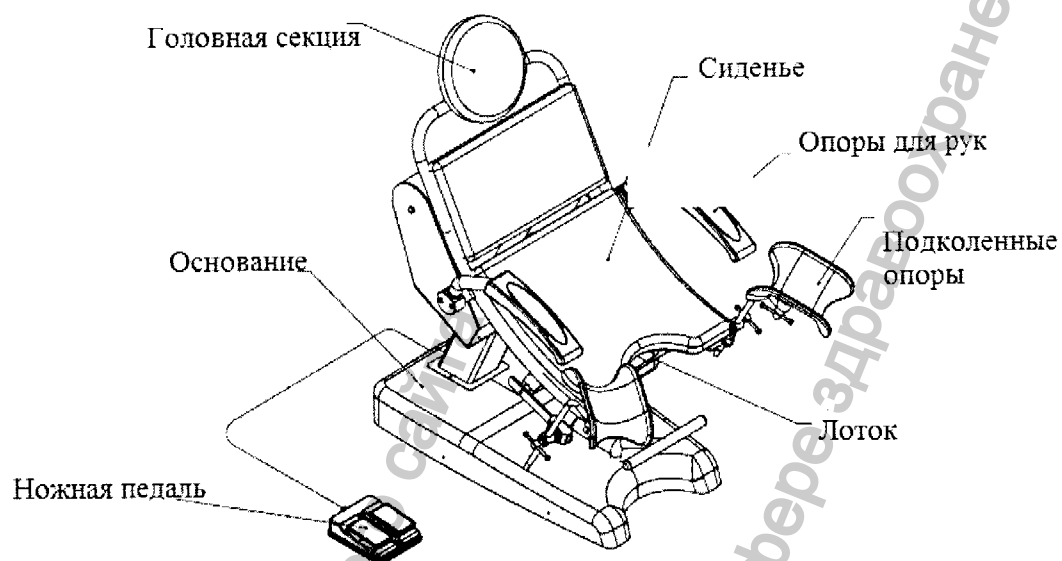


Рис.1

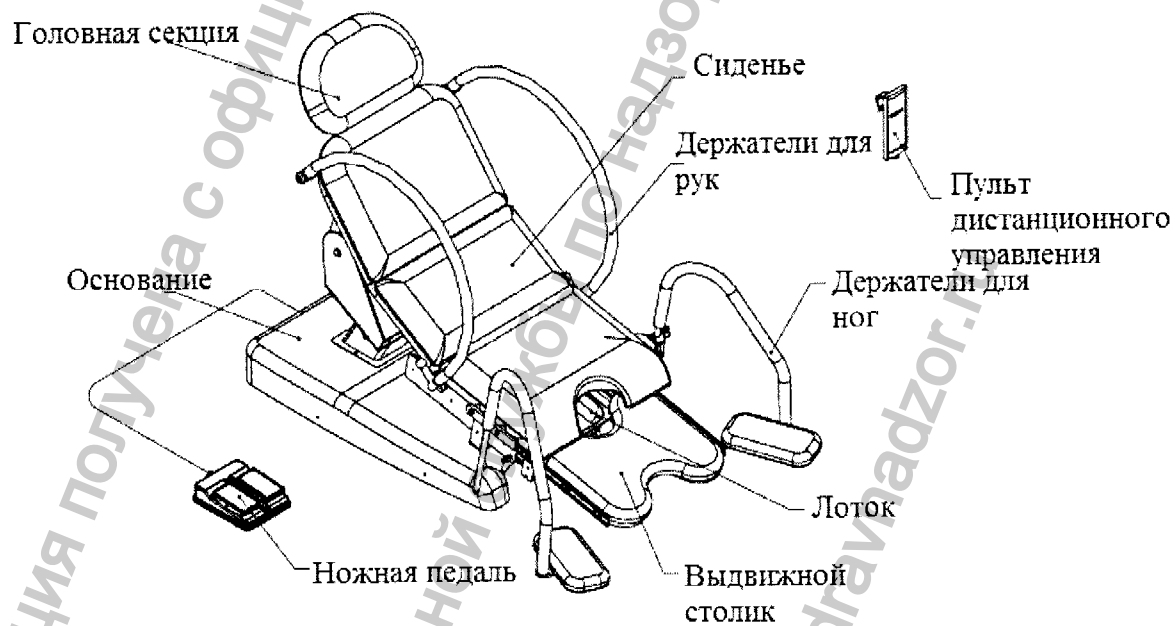


Рис.2

5. Меры предосторожности

5.1 Каждый элемент гинекологического кресла-кровати держите в чистоте.

5.1 Не эксплуатируйте оборудование без наличия контакта заземления.

5.3 После окончания работы, оборудование должно быть выключено из электрической сети.

5.4 Не допускать попадание рук или ног в подъемный механизм.

5.5 Работы по устранению неполадок в работе оборудования должны проводиться авторизованным сервисным центром нашей компании или же официальным дилером. Самостоятельно выполнять ремонтные работы категорически запрещается.

5.6 Не допускайте контакта металлических частей гинекологического кресла-кровати с другим высокочастотным хирургическим оборудованием.

5.7 Матрац не является антистатическим!

6. Способы управления гинекологическим креслом-кроватью

6.1 Использование педали управления

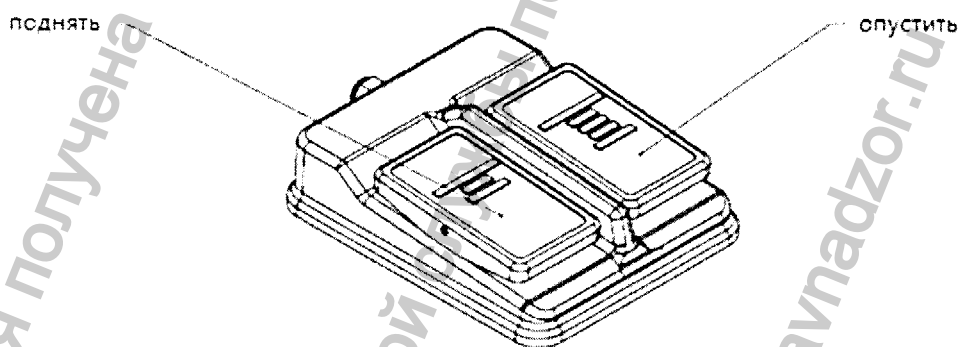


Рис.3

6.2 Панель питания

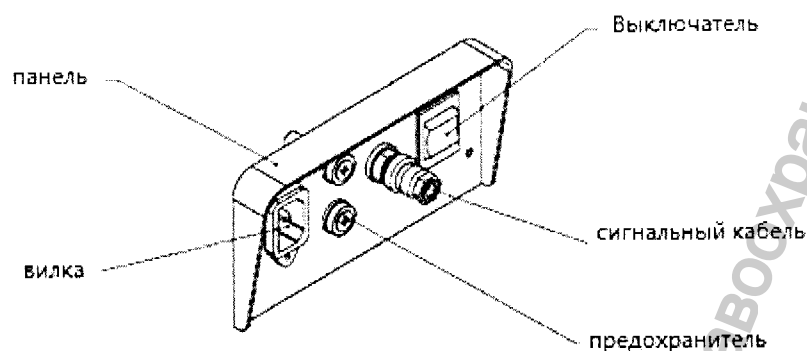


Рис.4

6.3 Подъем и опускание кресла

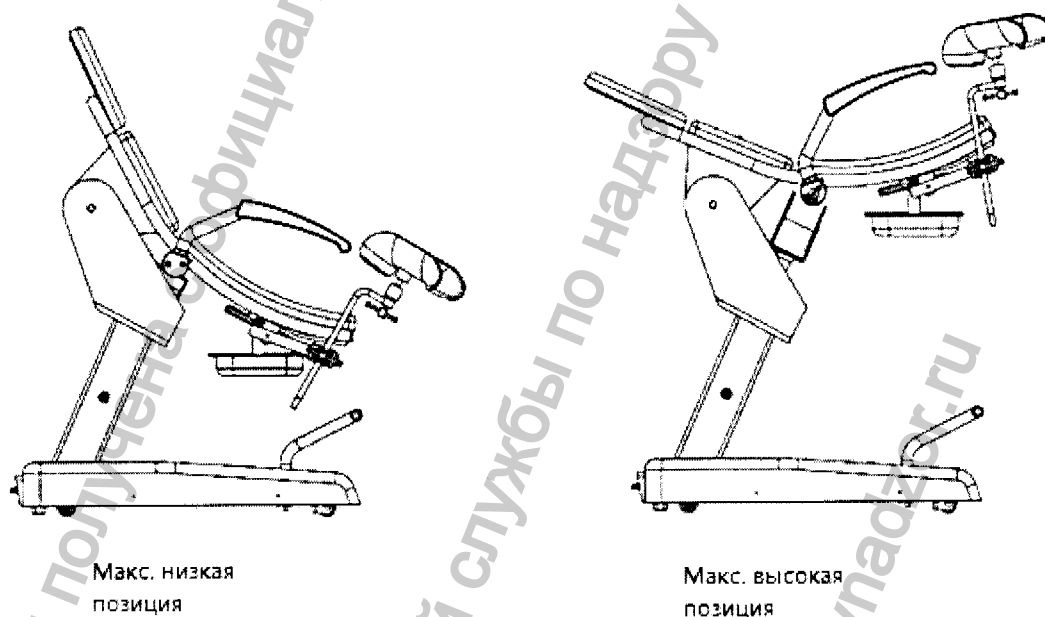


Рис.5

6.4 Установка бумажных полотенец

Откройте спинную секцию и на держателе установите рулон бумажных полотенец. Держите их в чистоте, замену проводите аналогичным путем.

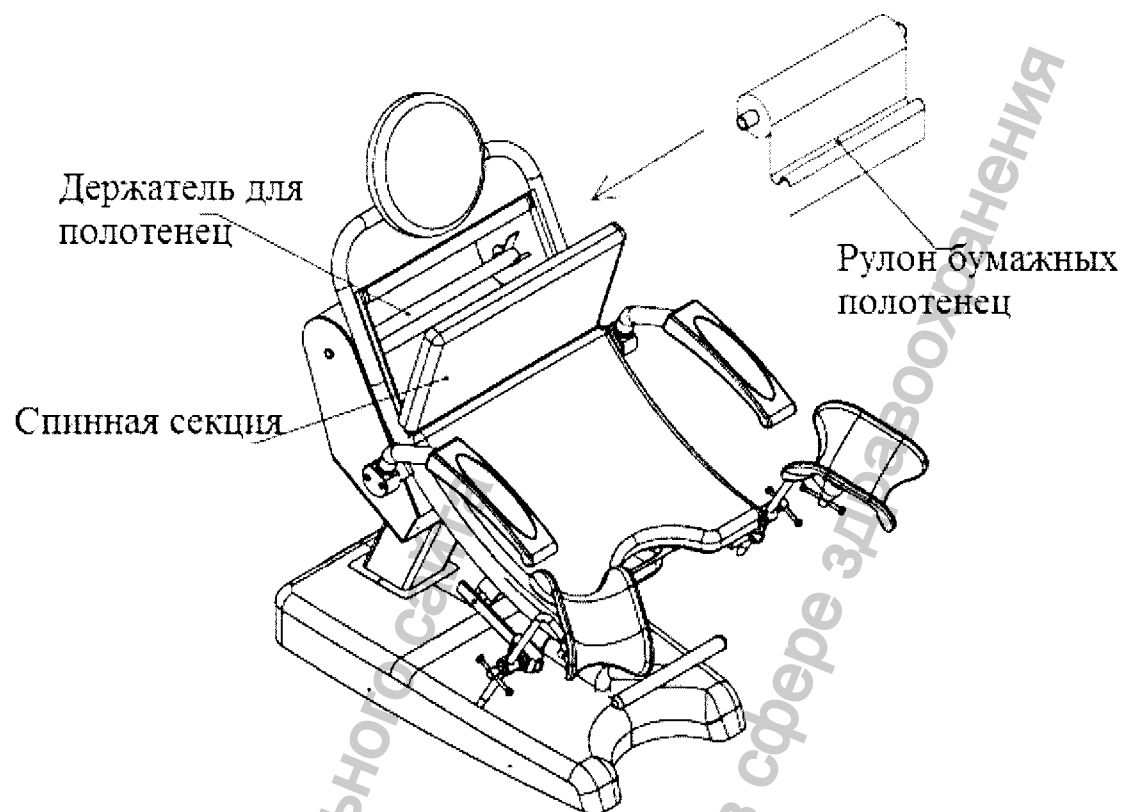


Рис.6

6.5 Перемещение и фиксация кресла

Поворачивая ножки стола по часовой стрелке (с помощью ключа), кресло устанавливается стационарно, поворачивая против часовой стрелки кресло можно перемещать.

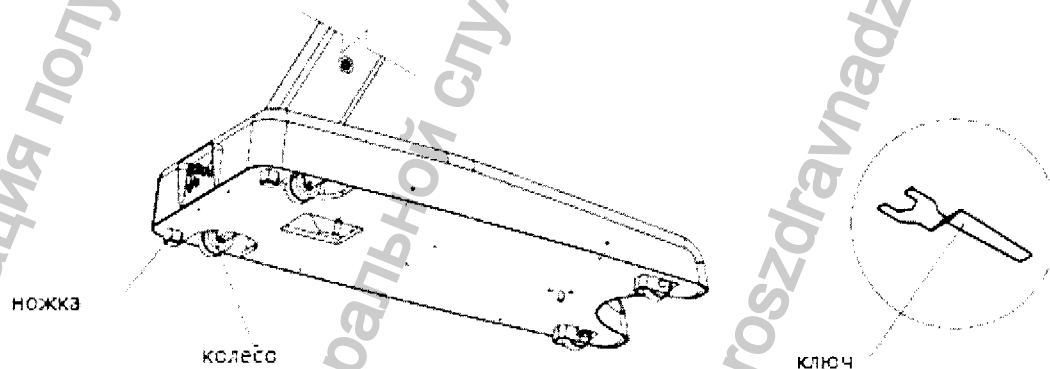


Рис.7

6.6 Регулировка подколенных опор

Ножные опоры регулируются вдоль направляющих, расположенных по бокам кресла. Для этого нужно ослабить зажимы и с помощью регулировочного винта настроить необходимое положение опоры.

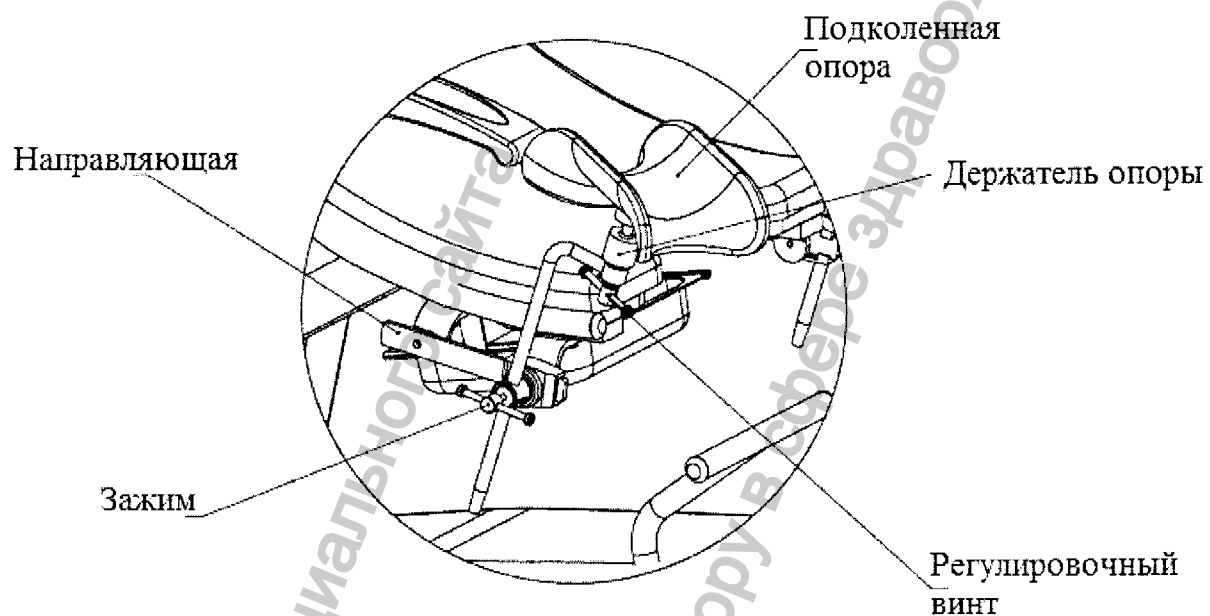


Рис.8.1

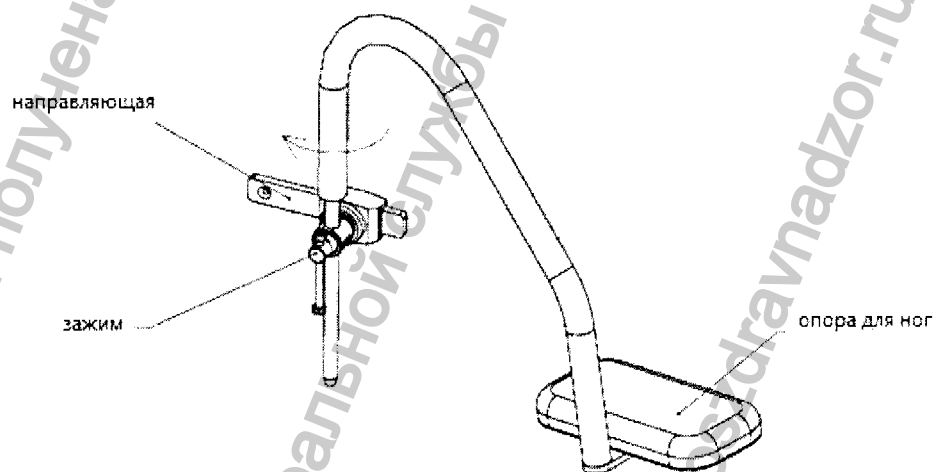


Рис.8.2

6.7 Использование лотка

Лоток расположен под сиденьем. Лоток перемещается по стальным направляющим и может принять любое нужное положение.

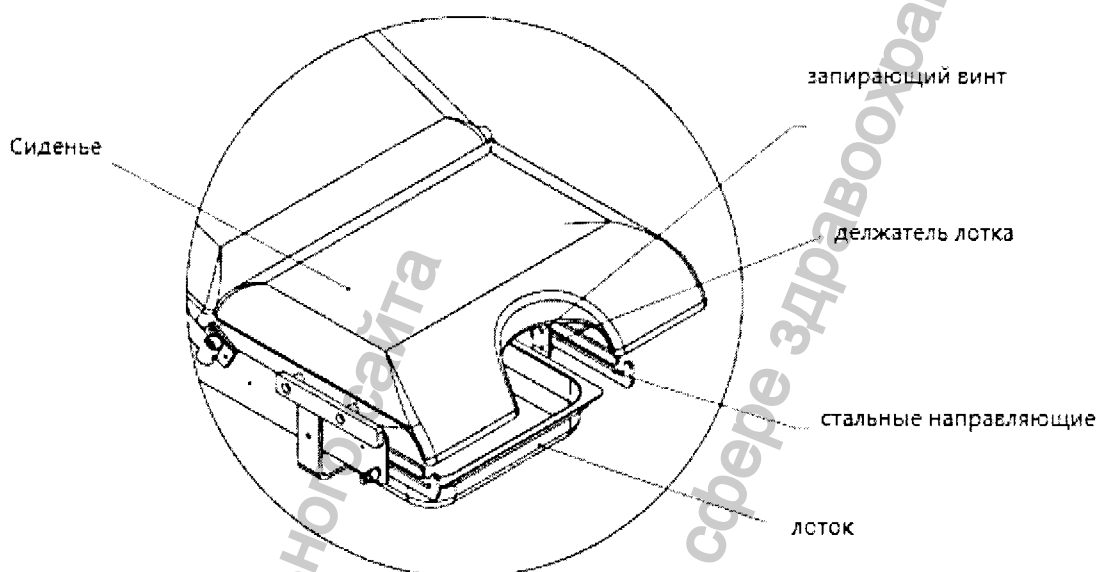


Рис.9

6.8 Использование выдвижного столика

Выдвижной столик находится под сиденьем, легко выдвигается и задвигается. Фиксируется с помощью зажимного винта. Используется во время хирургических операций.

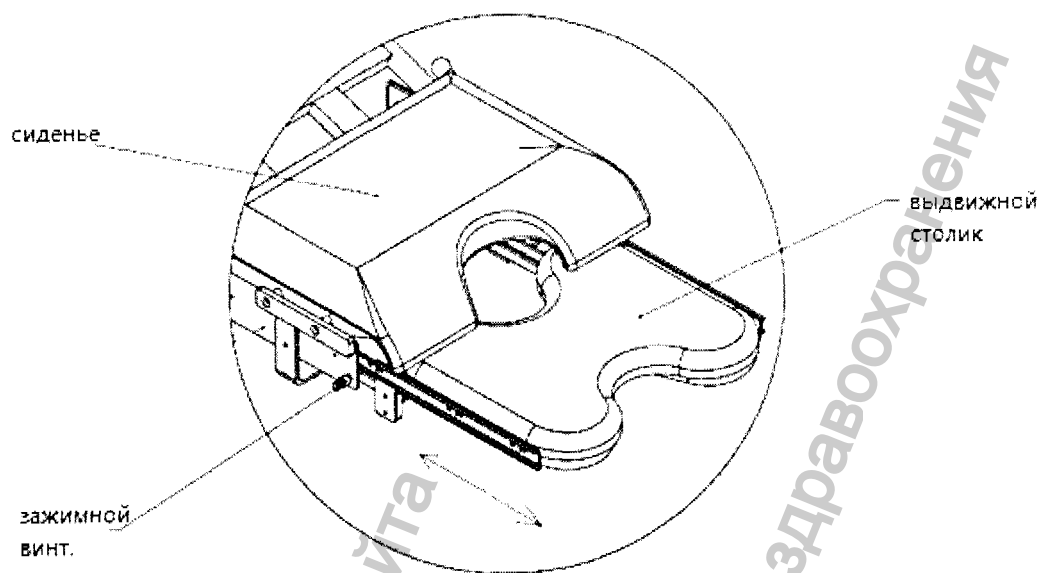


Рис.10

6.7 Использование держателей для рук

Держатели для рук расположены с обеих сторон кресла. В случае ненадобности держателей, они могут быть демонтированы или сдвинуты назад.

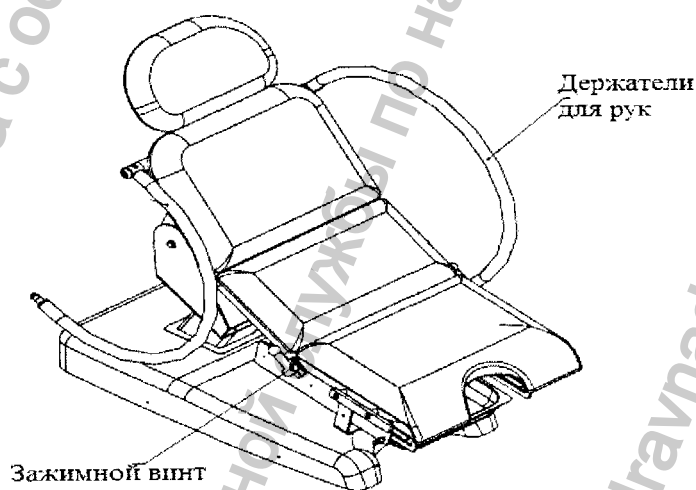


Рис.11

7. Класс безопасности изделия

По степени защиты от поражения электрическим током гинекологическое кресло-кровать Welle C60 относится к класс 1, тип В.

6.1 Пояснения к сигналам

Движение частей гинекологического кресла-кровати модели Welle C60.

Будьте осторожны при работе с зажимами подвижных частей, во избежание травм конечностей, пациента и пользователя.

6.2 Электробезопасность

1. Примечание: не используйте оборудование без контакта заземления. Неправильное использование сетевого шнура может привести к поражению током пользователя, пациента и оборудования.

2. Некоторые элементы кровати могут быть повреждены в период эксплуатации или в конце срока службы изделия, пожалуйста, соблюдайте условия эксплуатации (см. пункт 10 Выявление неисправностей и способы решения) и обращайтесь в нашу компанию для проведения технического обслуживания.

8. Техническое обслуживание

8.1 Каждая единица оборудования перед выпуском с завода прошла строгие испытания, пожалуйста не демонтируйте самостоятельно части гинекологического кресла-кровати.

8.2 Прежде чем передвигать оборудование, во избежание разрывов или повреждений, убедитесь что шнур питания выключен из сети.

8.3 Не допускайте попадание воды на кровать во избежание замыкания электричества. Гинекологическое кресло-кровать необходимо чистить мягкой салфеткой, для дезинфекции можно использовать 70% спирт.

8.4 Если необходимо заменить предохранитель на выдвижном (акушерском) столике, используйте предохранитель модели RF1-20-10A (Ф5×20мм) закрепите его винтами.

8.5 Срок службы таких элементов, как ручка для регулировки, двигатель – составляет 6 лет. Вам необходимо регулярно проводить техническое обслуживание этих элементов, при обнаружении неисправности замените их.

8.6 Если повреждены поверхность матраца или подколенные опоры, Вам необходимо их вовремя заменить.

9. Выявление неисправностей и их решение

Неисправность	Причина	Способы устранения
Не горит индикатор мощности	Сгорел предохранитель	Замените предохранитель, используйте модель RF1-20-10A (Ф5×20мм)
Не перемещается кресло-кровать	Проблема с электрической проводкой	Свяжитесь с поставщиком
Шум при перемещении кресла-кровати	Закончилось масло	Добавьте масло в двигатель

10. Условия эксплуатации, хранения и транспортировки изделия

1 Условия для нормальной эксплуатации

2. Температура окружающей среды 5-40° С

3. Относительная влажность: $\leq 80\%$

4. Атмосферное давление: 70кПа ~106кПа

5. Напряжение питания: 220В

6. Частота питающей сети: 50 Гц

Хранение и транспортировка.

1. Температура окружающей среды: от -40 0С ~ 55°С

2. Относительная влажность: $\leq 95\%$


3. Атмосферное давление: 50 кПа ~ 106 кПа

11. Послепродажное обслуживание

10.1 В течение 1 года после продажи оборудования, в случае неисправности или поломки запасных частей, наша компания бесплатно устраняет возникшие поломки и поставляет запчасти, требующие замены.

10.2 Наша компания также осуществляет обслуживание оборудования и в постгарантийный период.

12. Схема электропитания

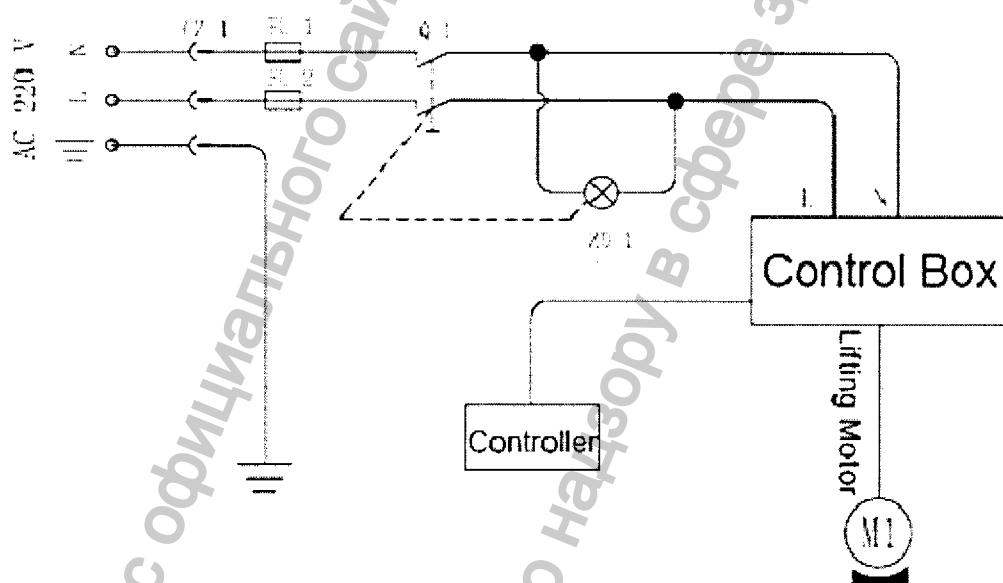

13. Принадлежности

1. Тазовая секция.
2. Вспомогательная ножная секция.
3. Спинка кровати головной секции.
4. Спинка кровати ножной секции.
5. Подушка для новорожденного.
6. Подушка головной секции – не более 8 шт.
7. Подушка спинной секции – не более 8 шт.
8. Подушка для сидения – не более 8 шт.
9. Подушка вспомогательной секции – не более 8 шт.

10. Чехлы – не более 6 шт.
11. Держатели для ног по Геппелю – не более 2 шт.
12. Опоры для ступеней – не более 2 шт.
13. Рукоятка тазовой секции – не более 2 шт.
14. Ограничители боковые – не более 4 шт.
15. Зажимы винтовые – не более 6 шт.
16. Лоток.
17. Стойка инфузионная.
18. Стол-подставка.
19. Опора лотка.
20. Система центрального тормоза.
21. Бамперы – не более 2 шт.
22. Механизм подъема кровати.
23. Кабель питания.
24. Ножной пульт.
25. Пульт ДУ.
26. Электронный блок управления.
27. Привод гидравлический.
28. Привод электрический.
29. Привод механический.
30. Водонепроницаемый матрац.
31. Ключ монтажный.
32. Ширма.
33. Светильник бестеневой операционный.
34. Ремни для фиксации – не более 8 шт.

- 35. Электронные весы.
- 36. CD плеер.
- 37. Стул врача.
- 38. Инструкция по эксплуатации.

14. Гарантийный талон

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Изделие	Гинекологическое кресло-кровать
Модель	Welle C60
Серийный номер	
Дата ввода в эксплуатацию	« _____ » _____ 20 _____ г.
Гарантийный период	

Представитель:

Подпись: _____ МП _____

Настоящим подтверждаю приемку установленного оборудования, пригодного к эксплуатации, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Представитель заказчика: _____

МП

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.roszdravnadzor.ru